

# ISTRUZIONI PER L'USO

## ZeoBentMED VULKANMINERALIEN

### BREVE DESCRIZIONE

Polvere Detox o Polvere Detox ultrafine o Capsule Detox  
Dispositivo medico naturale che favorisce il legame e l'eliminazione dei metalli pesanti dall'organismo.  
100 % NATURALE

### COMPOSIZIONE

80% zeolite clinoptilolite + 20% montmorillonite-bentonite o 50% zeolite clinoptilolite ultrafine + 50% montmorillonite-bentonite, 50% zeolite clinoptilolite ultrafine + 50% montmorillonite-bentonite da 500 mg per capsula di cellulosa.

### SCOPO

Questo dispositivo medico naturale favorisce il legame e l'eliminazione dei metalli pesanti (Pb, Hg, Cr, Cd, Al e Ni) dall'organismo degli adulti. Può anche ridurre i sintomi associati a livelli cronicamente elevati di metalli pesanti, come affaticamento e mal di testa.

### AVVERTENZE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Interrompere l'assunzione del prodotto se si notano effetti collaterali inattesi e consultare il medico. In caso di stitichezza, aumentare l'assunzione di liquidi, ridurre il dosaggio e, se necessario, consultare il medico. L'uso in pazienti con costipazione, ridotta funzionalità renale, con malattie in atto, durante una terapia farmacologica, chemioterapia o radioterapia, deve essere effettuato solo previa consultazione medica. Per donne in gravidanza o allattamento, bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni: consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo medico. Non inalare il prodotto. Non utilizzare contemporaneamente a bevande alcoliche, bevande contenenti caffeina e bevande acide, come pompelmo, arancia, limone e succo d'ananas. In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli a sufficienza. Durante l'uso, assicurare un'adeguata idratazione per mezzo di acqua o altre bevande non alcoliche. Non destinato a un uso prolungato. Interrompere l'uso se si notano effetti insoliti.

**Effetti collaterali:** In particolare nella prima settimana dopo l'assunzione può insorgere stitichezza. In casi molto rari, all'inizio dell'assunzione possono manifestarsi flatulenza, mal di stomaco, nausea, vertigini e stanchezza.

**Interazioni:** Quando si assumono farmaci contemporaneamente, assicurarsi che vengano assunti a distanza di 2 ore l'uno dall'altro. Salvo diversa prescrizione medica, assumere farmaci prima di assumere zeolite clinoptilolite + montmorillonite-bentonite.

### TIPOLOGIA E DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ZEOLITE ULTRAFINE + POLVERE DI BENTONITE

Dispositivo medico per uso orale: mescolare ½ cucchiaino (= 1 g) in un bicchiere d'acqua (250 ml) e bere subito dopo i pasti 2-3 volte al giorno. La durata massima di assunzione è di 12 settimane. In caso di assunzione ripetuta, è necessario osservare una pausa di almeno una settimana.

### TIPOLOGIA E DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ZEOLITE + POLVERE DI BENTONITE

Dispositivo medico per uso orale: mescolare 1 cucchiaino (= 2 g) in un bicchiere d'acqua (250 ml) e bere subito dopo i pasti 2-3 volte al giorno. La durata massima di assunzione è di 12 settimane. In caso di assunzione ripetuta, è necessario osservare una pausa di almeno una settimana.

### TIPOLOGIA E DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ZEOLITE + BENTONITE (CAPSULE)

Dispositivo medico per uso orale: Assumere 2 capsule 2-3 volte al giorno con un bicchiere d'acqua (250 ml) durante i pasti. La durata massima di assunzione è di 12 settimane. In caso di assunzione ripetuta, è necessario osservare una pausa di almeno una settimana.

### STOCCAGGIO E UTILIZZABILITÀ

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Chiudere bene il barattolo dopo l'uso. Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Da utilizzare entro: vedi data di scadenza sul barattolo

### SMALTIMENTO

Inhalt und Verpackung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, Violettgläser im Grünglascontainer.

### HINWEISE ZU VORKOMMISSEN

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, durch den Anwender zu melden.

### MEDIZINPRODUKTHERSTELLER

Natur Vital Handels GmbH  
Wirtschaftszeile Ost 10  
A-4482 Ennsdorf



### SIMBOLI E LORO SIGNIFICATO

Simbolo	Significato
	Tenere fuori dalla portata dei bambini!
	Dispositivo medico
	Utilizzabile fino a
	Numero articolo
	Numero di serie
	Proteggere dalla luce solare diretta!
	Proteggere dall'umidità!
	Marchio CE
	UDI
	Produttore del dispositivo medico
	Distributore
	Data di produzione

Rev. 00, 06/2023

Zeolith-Bentonit-**Versand**.it

Il vostro negozio online di minerali vulcanici [www.zeolith-bentonit-versand.it](http://www.zeolith-bentonit-versand.it)